

EXPOZOM Bracelet

*Lisez attentivement ce document
AVANT de réaliser votre prélèvement*

**SUIVEZ SCRUPULEUSEMENT
LES INSTRUCTIONS**

Identifiant de votre kit EXPOZOM

A conserver pour consulter vos résultats

IDENTIFIANT

1 Vérifiez le contenu de votre kit EXPOZOM



Une boîte en métal contenant le bracelet
A conserver pour le retour de l'échantillon



Un bracelet



Une fiche d'information sur le prélèvement
A conserver pour le retour de l'échantillon



Une enveloppe prépayée pour envoyer votre échantillon
à EXPOZOM

2 Commencez votre prélèvement



- 1 Ouvrez la boîte en métal et sortez le bracelet

Conservez la boîte pour envoyer l'échantillon au laboratoire



- 2 Mettez le bracelet à votre poignet.

Votre prélèvement commence.

Continuez à vivre normalement et portez le bracelet en permanence, même pour dormir et prendre votre douche.



- 3 Complétez la première partie de la fiche d'information.

3 Terminez votre prélèvement



- 4 Après 7 jours votre prélèvement est terminé


Complétez la dernière partie de la fiche d'information.

- 5 Retirez le bracelet de votre poignet.



- 6 Placez le bracelet dans la boîte en métal.

4 Renvoyez votre échantillon à **EXPOZOM**

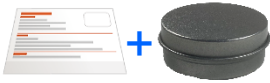

1 Placez la **boite en métal contenant le bracelet et la fiche d'information** dans l'enveloppe.



2 Fermez l'enveloppe



3 Mettez l'enveloppe dans une boîte aux lettres

4 Consultez vos résultats

Vos résultats sont présentés dans un rapport individuel et anonyme.

Les résultats sont disponibles dans un délais de 10 à 15 jours ouvrés à réception de l'échantillon au laboratoire.

Accédez à votre rapport d'analyse soit:

- ▶ Avec le lien sécurisé envoyé par email à l'adresse de commande du kit d'analyse
- ▶ A l'adresse **<https://rapports.science-concept.com/>**
Le login est l'adresse email renseignée sur le sachet zip et le mot de passe est l'identifiant du kit EXPOZOM



**Vous avez une question ?
Vous avez besoin d'un conseil ou d'une information ?**

N'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse **contact@expozom.com**